



Adaptado a todas as idades

- Portátil
- Compacto
- Fácil de usar
- Rápido
- Leve



Inclui bateria recarregável



- Maioria dos tratamentos feitos em menos de 10 minutos
- Frequência ultrasónica: 2,5 Mhz
- Tamanho das partículas: 5 um MMAD
- Temporizador automático: desliga ao fim de 10 minutos
- Sensor de humidade: o aparelho não funciona sem água no tanque
- O tanque só pode levar água, de preferência destilada
- Água morna no tanque resulta num grau de nebulização elevado; já água fria implica uma nebulização inferior
- A medicação deve ser colocada somente na taça de medicamento
- A capacidade máxima das taças de medicamento é de 8 ml; nunca usar volumes superiores
- Desligar o aparelho da fonte de energia (adaptador de corrente ou bateria) após cada uso
- Se o tanque de água ou a taça de medicamento estiverem vazios, não ligar o aparelho
- Nunca, mas mesmo nunca, trabalhar com o aparelho mais de 20 minutos seguidos
- Esperar, pelo menos, 30 minutos antes de voltar a usar
- A bateria deve ser carregada durante 24 horas na 1ª vez ou depois de guardada durante um período longo de tempo; 4 a 12 horas em seguida conforme uso
- Não carregar a bateria ligada ao aparelho

Nebulizador Ultrassónico

NEB-747

CNP 7962761



Inclui

- nebulizador
- bateria recarregável
- adaptador de corrente
- máscara adulto
- máscara criança
- 5 taças para medicação
- adaptador bucal
- adaptador nasal
- tubo de ligação
- bolsa de transporte



mais frequência ultrasónica

maior eficácia



CE 423



Para uma vida mais saudável!