

MANUAL DE INSTRUÇÕES



NEBULIZADOR COMPRESSOR

Modelo: **NEB-C130**

CNP 6146514

CE0434



**ANTES DE USAR,
LER COM ATENÇÃO O
MANUAL DE INSTRUÇÕES**

medcare®
NEBULIZADOR COMPRESSOR

MODELO: NEB-C130

I N S T R U Ç Õ E S

1. Introdução -----	Pag. 2
2. Identificação do produto -----	Pag. 3
3. Precauções -----	Pag. 3/4
4. Garantia -----	Pág. 4
5. Funcionamento -----	Pag. 4/5
6. Limpeza -----	Pag. 5/6
7. Substituição de peças e acessórios -----	Pag. 6
8. Especificações -----	Pag. 6


1. INTRODUÇÃO

Obrigado por ter comprado o nebulizador compressor C-130 da medcare®. É um dispositivo médico compacto que se destina à entrega eficiente de medicamentos nas passagens bronquiais dos pulmões. Com os cuidados próprios e uso adequado irá proporcionar-lhe muitos anos de tratamentos.

Este produto foi desenvolvido para tratamentos eficazes da asma, alergias e outros distúrbios respiratórios. Ele produz uma corrente de ar que é conduzida através de um tubo transparente até o nebulizador. Quando o ar entra no copo do nebulizador converte a medicação prescrita num aerosol para uma fácil inalação.

O seu nebulizador compressor da medcare® deve ser usado com supervisão médica e ou do terapeuta respiratório. Recomendamos que leia estas instruções para conhecer as características do produto. O uso indevido deste produto deve ser evitado.

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

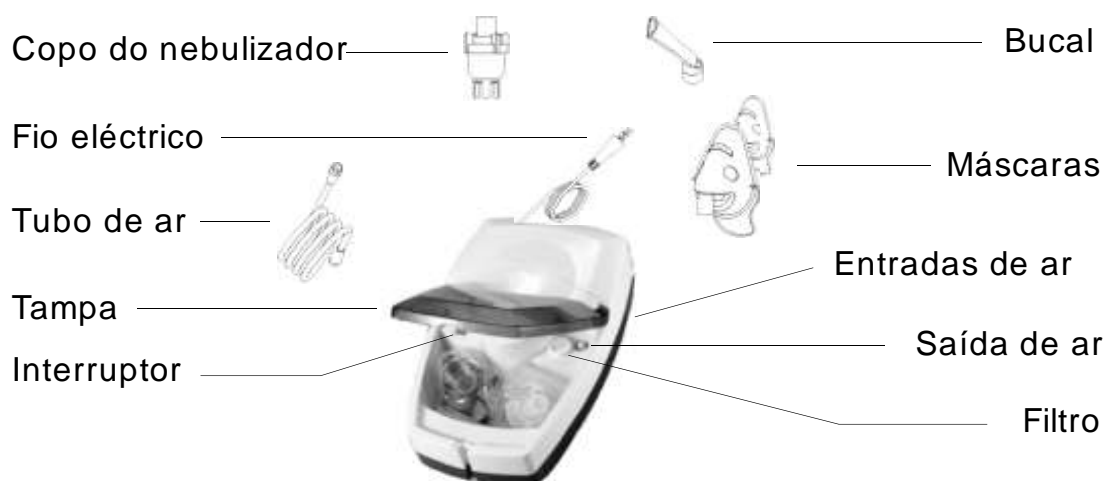

3. PRECAUÇÕES

Nota: Leia as instruções todas antes de usar o aparelho. As precauções seguintes são necessárias quando se utiliza um aparelho eléctrico.

Atenção: Ignorar a leitura e desrespeitar as precauções pode resultar em acidente ou dano para o aparelho.

Cuidados com o aparelho:

1. Para evitar choques eléctricos: • afaste o aparelho da água; • nunca mergulhe o fio eléctrico ou o aparelho em líquidos; • não use durante o banho; • não pegue no aparelho se ele tiver caído à água, desligando-o imediatamente.
2. Nunca utilize o aparelho se tiver alguma parte danificada, incluindo o fio eléctrico, se tiver dentro de água ou molhado. Envie-o para observação e reparação.
3. O aparelho não deve ser usado junto a gases inflamáveis ou spray.
4. Desligue o aparelho da corrente antes de o limpar e depois de o utilizar.
5. Não utilize outros acessórios excepto os recomendados pelo fabricante.

Cuidados com o funcionamento:

1. Ligue este aparelho unicamente a uma voltagem adequada.
2. Procure estar acompanhado quando utilizar o aparelho.
3. Não utilize o aparelho se o fio eléctrico estiver danificado ou molhado ou se não estiver a trabalhar convenientemente. Devolva-o para reparação.
4. Se ocorrer alguma anomalia de funcionamento desligue o aparelho e envie-o para observação e reparação.
5. Desligue imediatamente o aparelho depois de cada uso.
6. Não bloqueie as entradas de ar do aparelho nem o coloque a funcionar num sítio onde as entradas de ar possam ser obstruídas.

Cuidados de armazenamento:

1. Guarde o aparelho fora do alcance das crianças.
2. Não guardar directamente sob luz solar, alta temperatura ou humidade.
3. Desligue sempre o aparelho da corrente quando não o estiver a usar.

Cuidados de limpeza:


1. Não mergulhe o aparelho na água, pois pode danificá-lo.
2. Desligue o aparelho da corrente eléctrica antes de o limpar.
3. Limpe todas as peças do aparelho após cada uso conforme as instruções.

4. GARANTIA

O aparelho NEB-C130 tem uma garantia de 3 anos contra defeitos de materiais e de fabrico. Durante este período, a unidade será reparada ou substituída gratuitamente desde que as instruções de utilização sejam rigorosamente cumpridas e a anomalia não seja originada por uso indevido.

5. FUNCIONAMENTO DO NEBULIZADOR COMPRESSOR

1. Coloque o aparelho numa superfície lisa e estável. Certifique-se que chega facilmente à unidade quando estiver sentado.
 2. Abra a tampa do aparelho e retire todos os acessórios. **Importante:** Antes de cada utilização o aparelho deve estar completamente limpo de acordo com as instruções.
 3. Cuidadosamente, rode a parte de cima do copo do nebulizador no sentido contrário dos ponteiros do relógio para aceder ao cone de 1. enchimento do medicamento .
 4. Encha o fundo do cone do copo do nebulizador de acordo com o medicamento e na quantidade prescrita pelo seu médico.
 5. Rode a parte de cima do copo do nebulizador no sentido dos ponteiros do relógio para fixar o cone de enchimento. Certifique-se que as duas partes estão seguras.
 6. Introduza uma ponta do tubo de ar na base do copo do nebulizador.
 7. Introduza a outra ponta do tubo na saída de ar localizada no topo do aparelho debaixo da tampa.
 8. Coloque o bucal ou a máscara na parte de cima do copo do nebulizador.
 9. Ligue o fio eléctrico a uma fonte de alimentação de corrente. Certifique-se que o interruptor está na posição de desligado.
- Ligue o interruptor para começar o seu tratamento.

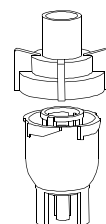

Cone de enchimento do medicamento

Importante: O motor do compressor tem um protector térmico que desliga o aparelho automaticamente para evitar um sobreaquecimento. Quando isso acontecer, por favor:

- a. Desligue o interruptor.
- b. Retire o fio eléctrico da fonte de alimentação.
- c. Espere 30 minutos até que o motor arrefeça para iniciar novo tratamento. Certifique-se que as entradas de ar não estão obstruídas.

11. Quando o tratamento acabar desligue o aparelho no interruptor e o fio eléctrico da fonte de alimentação.

6. LIMPEZA

Recomenda-se que o copo do nebulizador, bucal e máscaras sejam cuidadosamente limpos com água quente após cada uso e com um detergente neutro depois do último tratamento diário. Se o seu médico especificar outro método de limpeza siga as suas instruções.

Limpeza (após cada tratamento)

1. Separe o tubo do ar, o copo do nebulizador, o bucal e a máscara.
2. Abra o copo do nebulizador conforme indicado anteriormente.
3. Passe por água quente o copo do nebulizador, o bucal e a máscara.
4. Seque as peças com um pano limpo e macio ou deixe-as secar ao ar.
5. Guarde as peças só quando estiverem completamente secas no compartimento do aparelho e feche a tampa.

Desinfecção

Proceda da seguinte maneira para desinfectar as peças a não ser que tenha instruções específicas do seu médico para o fazer de outra forma. Sugere-se a desinfecção depois do último tratamento do dia.

1. Use uma parte de vinagre branco e três partes de água destilada. Verifique se a quantidade da mistura é suficiente para submergir o copo do nebulizador, o bucal e a máscara.
2. Proceda da forma indicada nos pontos 1 e 2 do capítulo de limpeza.
3. Lave o copo do nebulizador, o bucal e a máscara em água quente com detergente neutro. Depois passe as peças por água quente da torneira.
4. Mergulhe as peças na mistura de água e vinagre durante trinta minutos.
5. Complete o procedimento indicado em 4. e 5. do capítulo limpeza.

Limpeza do compressor


1. Limpe diariamente o aparelho com um pano húmido.
2. Não use detergentes ou abrasivos que podem danificar a superfície do aparelho.

Substituição do Filtro

1. Não use algodão. Não lave ou limpe o filtro. Use unicamente filtros da medcare® e não ponha o aparelho a trabalhar sem filtro.
2. Mude o filtro ao fim de 30 dias ou quando ele estiver acinzentado.
3. Modo de substituição:
 - A. Remova a pega do filtro.
 - B. Substitua o filtro usado por um novo.
 - C. Volte a colocar a pega do filtro.

7. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

Todas as peças ou acessórios estão disponíveis no revendedor ou podem ser encomendados por mail. A chupeta para inalação permite ao bebé receber o aerosol facilmente com uma respiração normal.

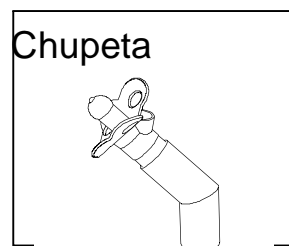

8. ESPECIFICAÇÕES

Alimentação	230V/50HZ
Consumo de energia	0,8 A
Capacidade da medicação	8ml
Tamanho das partículas	0.5 a 10 µm
MMAD	4 µm
Nível sonoro	Cerca de 60 dBA
Capacidade do cone	13 ml (cc)
Taxa de nebulização média	0.2ml/min
△pressão do compressor	30 a 36 Psi (2.1 a 2.5 bar)
△pressão em funcionamento	8 a 16 Psi (0.5 a 1.0 bar)
△fluxo de ar	6 ~ 8 lpm
Temperatura/ funcionamento	10°C a 40°C
Humidade/funcionamento	10 a 95% RH
Temperatura /Armazenagem	-20°C a 70°C
Humidade/Armazenagem	10 a 95% RH
Dimensões (C x L x A)	285 x 180 x 110 mm
Peso	2 kg
Peças	Nebulizador, Tubo ar, Bucal, Filtros(5pcs), Máscaras
Acessórios opcionais	Chupeta

Protecções/Símbolos



Aparelho Classe II
Tipo B



Atenção!
Leia as instruções



Isolamento
duplo

Modo de operação: Contínuo

Distribuído por: medcare® - Paulo Ferreira & Santos, Lda. • Apartado 2 • 4536-909 LOUROSA
E-mail: pafesa@mail.telepac.pt • Tel: 22 744 3010 - 22 7445 4611